

STAMMOPUR GR

Instrumenten-Grundreiniger

MD CE • für Ultraschall • Konzentrat

Ein optimales Reinigungsergebnis im Ultraschallbad wird durch den Einsatz von speziellen, auf dieses Verfahren abgestimmten Reinigungspräparaten, erlangt. **STAMMOPUR GR** bietet eine gründliche Entfernung der Verunreinigungen bei gleichzeitiger Schonung des Reinigungsgutes und der Ultraschallkomponenten.

STAMMOPUR GR ist für den Prozess der Instandsetzung von **zahnmedizinischen und medizinischen Instrumenten**, sowie von **Zubehör und Komponenten** von Medizinprodukten, im Ultraschallbad formuliert und bietet:

- Grundreinigung vor dem Prozess der Aufbereitung
- MDR-konform
- wirtschaftliches Konzentrat, biologisch abbaubar



Auf einen Blick

- Konzentrat
- Anwendung ausschließlich im indirekten Verfahren
- Wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration
- Sehr hohe Reinigungswirkung im Ultraschallbad
- Sehr hohe Materialverträglichkeit
- stark sauer
- Biologisch abbaubar

Die jahrzehntelange Erfahrung und das umfassende Wissen der **DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik** spiegeln sich unter anderem in unserer Konformität gemäß der **Medical Device Regulation (MDR)** wider. Die STAMMOPUR-Präparate bieten so eine frühzeitige und hohe Planungssicherheit, um Ihre Qualitätsanforderungen sicher erfüllen zu können.

Konformität

Medizinprodukt, Klasse I, **CE** gemäß MDR

Anwendungsbereich

STAMMOPUR GR ist ein Konzentrat zur manuellen Grundreinigung im Ultraschallbad von

zahnmedizinischen und medizinischen Instrumenten, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten

aus Edelstahl, Edelmetall, Titan, Glas, Keramik, Porzellan und Kunststoff.

Die **Anwendung** erfolgt im Prozess der Instandsetzung von medizinischen Instrumenten, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten, in der AEMP, in der Klinik und der Arzt- und Zahnarztpraxis.

Im Prozess der Grundreinigung während der Instandsetzung im Bereich des Refurbishings unterstützt **STAMMOPUR GR** die qualitative sowie ökologische Nachhaltigkeit.

Die Anwendung ist zur Entfernung von Anlauffarben, Oxiden, Verfleckungen, mineralischen Rückständen und eingebrannten Resten auf medizinischen Instrumenten vorgesehen.

STAMMOPUR GR hat eine sehr hohe Reinigungswirkung, die jedoch erst im Zusammenhang mit der Ultraschalleinwirkung im Ultraschallbad und erhöhter Temperatur wirksam wird.

STAMMOPUR GR hat eine hohe Materialverträglichkeit, im Zweifelsfall ist diese vorab zu testen.

Die ausschließlich beruflichen Anwender sind geschultes Fachpersonal.

Dosierung • Einwirkzeiten • Temperatur

Anwendung im Ultraschallbad:

5 % • 3 – 10 min • 50 – 60 °C

Die Dosierung und Einwirkzeit sind einzuhalten.

Bei der Anwendung im Ultraschallbad **STAMMOPUR GR** ausschließlich mit indirekter Beschallung (im Einsatzgefäß) verwenden.

Anwendung

Vor der Anwendung sind das Etikett (Gebrauchsanweisung) und das Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnis zu nehmen.

STAMMOPUR GR hat eine sehr hohe Reinigungswirkung, die jedoch erst im Zusammenhang mit der Ultraschalleinwirkung im Ultraschallbad und erhöhter Temperatur wirksam wird.

Die Anwendung erfolgt ausschließlich im Ultraschallbad im indirekten Verfahren in Einsatzgefäßen, wie z. B. Einhängewanne aus Kunststoff oder Becherglas. Hierzu sind die Angaben der Ultraschallgeräte-Hersteller in Bezug auf Durchführung und Zubehör zu beachten.

Als Kontaktflüssigkeit im Ultraschallbad kann z. B. **STAMMOPUR R**, 2 % (Medizin) oder **TICKOMED 1**, 1 % (Dental) verwendet werden.

Die Anwendung erfolgt verdünnt mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität. Eine Beimischung von Zusätzen in die Lösung ist nicht zulässig.

Auf die vollständige Benetzung des Reinigungsgutes ist zu achten. Hohlkörper so einlegen, dass die Luft aus den Hohlräumen vollständig entweicht.

Nach der Anwendung die Teile gründlich mit Wasser spülen und trocknen. Für die Fleckenfreiheit mit VE-Wasser spülen.

Anschließend erfolgt die Weiterbehandlung gem. **KRINKO/BfArM**-Empfehlung (Reinigung, Desinfektion, abschließende Desinfektion oder Sterilisation je nach Einstufung der Instrumente).

Die Gebrauchslösung ist mindestens arbeitstäglich zu wechseln.

Besondere Hinweise zur nicht-medizinischen

Anwendung:

STAMMOPUR GR kann zur Grundreinigung von Arbeitsschutzgeräten und Teilen von Tauchausrüstungen (Lungenautomaten) unter den gleichen Einsatzbedingungen wie beschrieben im Ultraschallbad eingesetzt werden.

Besondere Anwendungshinweise

Bohrer und weitere rotierende Kleininstrumente nicht mit **STAMMOPUR GR** behandeln.

Bei der Anwendung im Ultraschallbad sind die Hinweise des Ultraschallgeräteherstellers strikt zu beachten. Die Flüssigkeit im Ultraschallbad muss vor der Anwendung entgast werden.

Nicht geeignet für säureempfindlichen Materialien wie Leichtmetalle und bei beschädigter Verchromung.

Optiken, Lichtleiter und geklebte Teile nicht mit Ultraschall behandeln.

STAMMOPUR GR ist speziell für die Anwendung in Ultraschallgeräten entwickelt.

Die seit vielen Jahrzehnten erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen **DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik** und **BANDELIN electronic GmbH & Co. KG** in der Entwicklung der Reinigungs- und Desinfektionspräparate fördert eine große Expertise in allen Anwendungsbereichen der Ultraschallreinigung.

STAMMOPUR - SONOREX

zwei starke Marken für Ihre
Reinigung und Desinfektion
in Medizin, Dental, Labor,
Arbeitsschutz/Hygiene und Atemschutz!

Anwendungsvideos auf der YouTube-Seite von **BANDELIN electronic** unter: <https://www.youtube.com/c/BANDELIN>

Gebindegrößen/ Zubehör

REF

Menge	Gebindeform	Bestell-Nr.
1 Liter	PE-Flasche	968
2 Liter	PE-Flasche	938
5 Liter	PE-Kanister	969
10 Liter	PE-Kanister	6031

Zubehör	Variante	Bestell-Nr.
Dosierpumpe	5 Liter	268
	10 Liter	2660
Messbecher	100 ml	294



Bestellnummern unseres Vertriebspartners
BANDELIN electronic GmbH & Co.KG
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30 76880-0 • Fax: +49 30 7734699
www.bandelin.com • info@bandelin.com

Inhaltsstoffe

> 30 % Phosphorsäure,
5–15 % nichtionische Tenside,
5–15 % kationische Tenside,
Inhibitor.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: farblose - hellgelbe Flüssigkeit
Dichte: 1,41g/cm³
Temperaturstabilität: -15 bis 60 °C
pH-Wert: 1,9 bei 1 % in VE-Wasser
Stark sauer • biologisch abbaubar.

Transport

Die Gebinde sind für den Transport geeignet und zugelassen. Sie unterliegen dem ADR (Gefahrgutverordnung Straße, GGVS), IMDG (Seeschifftransport), sowie IATA/ICAO (Lufttransport).

Der Temperaturbereich während des Transports ist auf den Bereich der geprüften Stabilität des Präparats von -15 °C und +60 °C beschränkt.

Lagerung

Grundsätzlich gilt: Präparate aufrecht, verschlossen, sauber, trocken und bei allgemein üblichen Lagertemperaturen lagern. Sie erfolgt in einem Temperaturbereich zwischen +5 °C bis +40 °C, der als allgemein übliche Lagertemperatur angesehen wird.

Die Lagerung beim Anwender im Bereich der Anwendung erfolgt bei Raumtemperatur, die je nach Arbeitsbereich zwischen +12 °C und max. +35 °C liegen.

Ökologie und Entsorgung

Die verwendete Lösung kann nach der Neutralisation und anschließend mit der 4-fachen Menge Wasser verdünnt in die Kanalisation gegeben werden. Die Neutralisation von 1 Liter unverbrauchter 5%iger **STAMMOPUR GR** Lösung kann z. B. mit 30 g Soda erfolgen. Die enthaltenen Tenside sind gemäß EG-Detergenzienverordnung (EG/648/2004) biologisch abbaubar.

Die konkreten Handlungsanweisungen zur Entsorgung obliegen der Organisation der Arbeitsabläufe beim Anwender. Lokale Verordnungen sind zu beachten.

Die Gebinde sind für das Recycling gekennzeichnet und somit sortenrein, restentleert und gespült gemäß den lokalen Entsorgungsrichtlinien zu entsorgen. Produktreste sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Kennzeichnung gem. (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

Die Kennzeichnung bezieht sich nur auf das Konzentrat und nicht auf die Anwendungslösung.



Gefahr

UFI-Code: 1F00-Q072-200Q-40NX

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+ P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Schwerwiegende Vorkommnisse mit dem Produkt sind **DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik** und der zuständigen Behörde zu melden.

Basis-UDI-DI: ++G014STGR052L
SRN-Nummer: DE-MF-000005887
Stand: Juli 2026 (81108de-09/2026-07)

Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen übernehmen wir die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Diese Produktinformation kann jedoch nur unverbindlich informieren. Unsere Anwendungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, die nicht auf die Vielzahl der Oberflächen und Verunreinigungen übertragen werden können. Deshalb empfehlen wir dringend, das Produkt an unauffälliger Stelle auf seine Eignung zu prüfen.

EG-Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsanweisungen als PDF-Download unter www.dr-stamm.de

 DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de